

**Dispositivo de sujeción de cánula nasal Sticky Whiskers  
(Bandas Adhesivas) Instrucciones de uso**

1. Prepare la piel: limpia y seca, sin ungüentos ni apósitos
2. Enrolle el lazo flexible alrededor de la cánula estilo bastón de caramelo como se



3. Coloque las bandas adhesivas a lo largo del labio superior del niño. Los extremos pueden quedar hacia arriba o hacia abajo, según la ubicación deseada de la cánula. Alise una vez en su sitio.
4. Coloque las puntillas de la cánula en la nariz del niño y permita que las cintas del lazo flexible se conecten con el gancho de perfil bajo de las bandas adhesivas



Las bandas adhesivas ayudan a mantener la cánula en su lugar, directamente debajo de la nariz del niño. Para cambiar la ubicación, simplemente separe el gancho y el lazo y vuelva a acomodar de la forma deseada.

Las Bandas Adhesivas deben reemplazarse si se ensucian o después de transcurridas entre 48 y 72 hs. La base hidrocoloide es un adhesivo suave pero seguro, recomendada por las pautas de cuidado de la piel de la Asociación Nacional de Enfermeras Neonatólogas (NANN, por su sigla en inglés), y no provocará la irritación de la piel mientras esté colocada o al ser retirada.



Para uso de un solo paciente

El contenido de este paquete está limpio y listo para su uso normal. El contenido no es estéril



No estéril



No esterilizar de nuevo



No exponer a temperaturas superiores a 65°C



Contenido del paquete: Este paquete contiene 25 dispositivo de sujeción de cánula nasal Sticky Whiskers (Bandas Adhesivas)


País de origen: EE.UU



# Explanation of symbols

	<b>English</b>	<b>Manufacturer</b>
	<b>Français</b>	<b>Fabricant</b>
	<b>Deutsch</b>	<b>Hersteller</b>
	<b>Español</b>	<b>Fabricante</b>
	<b>Svenska</b>	<b>Fabrikör</b>

	<b>English</b>	<b>Authorized Representative</b>
	<b>Français</b>	<b>Représentant Autorisé</b>
	<b>Deutsch</b>	<b>Autorisierter Repräsentant</b>
	<b>Español</b>	<b>Representante Autorizado</b>
	<b>Svenska</b>	<b>Behörigt Representativt</b>

	<b>English</b>	<b>Consult Instructions for use</b>
	<b>Français</b>	<b>Consultez les instructions pour l'usage</b>
	<b>Deutsch</b>	<b>Beraten Sie Anwendungsvorschriften</b>
	<b>Español</b>	<b>Consulte las instrucciones para el uso</b>
	<b>Svenska</b>	<b>Rådfråga Instruktionerna för Använda</b>