

Appareil de fixation de la canule nasale Moustache coulante Comment l'utiliser

1. Préparer la peau ---- elle doit être propre, sèche et exempt de toute pommade ou pansement

2. Mettre la boucle autour de la canule façon « entre crochets », comme le




3. Placer la moustache collante le long de la lèvre supérieure de l'enfant. Les extrémités peuvent être tournées vers le haut ou vers le bas en fonction de la position que l'on recherche pour la canule.
Mettre doucement en place.

4. Placer les dents de la canule dans le nez de l'enfant et laisser les bandes de la boucle faire le lien avec le crochet discret sur la moustache collante




La moustache collante permette de maintenir la canule en place directement sous le nez de l'enfant. Pour changer de position il suffit de désengager le crochet et la boucle et de réaligner en fonction des besoins.


La moustache collante doit être remplacée si elle est sale ou 48 à 72 heures après utilisation. Le support hydro-colloïde est un accessoire doux mais sûr, recommandé par les directives de soin de la peau NANN, il ne causera pas d'irritation de la peau pendant qu'il est en place ou quand on le retire.

 À l'usage e'un seul patient seulement

 Non stérile

 Ne pas re-stériliser

 Ne pas exposer à des températures supérieures à 65C

 Ce lot contient 25 appareil de fixation de la canule nasale Moustache coulante

Le contenu de ce lot est propre et prêt à une utilisation normale. Ils ne sont pas stériles.


Pays d'origine: USA



Explanation of symbols

	English	Manufacturer
	Français	Fabricant
	Deutsch	Hersteller
	Español	Fabricante
	Svenska	Fabrikör

	English	Authorized Representative
	Français	Représentant Autorisé
	Deutsch	Autorisierter Repräsentant
	Español	Representante Autorizado
	Svenska	Behörigt Representativt

	English	Consult Instructions for use
	Français	Consultez les instructions pour l'usage
	Deutsch	Beraten Sie Anwendungsvorschriften
	Español	Consulte las instrucciones para el uso
	Svenska	Rådfråga Instruktionerna för Använda