

Sticky Whiskers fästsystem för näskanyl Bruksanvisning

1. Förbered huden----rengör och torka, ta bort alla salvor och förband
2. Linda en mjuk böjd ögla runt kanylen så som visas på bilden.








3. Placera Sticky Whiskers längs barnets överläpp. Ändarna kan peka uppåt eller nedåt, beroende på önskad kanylplacering.
Stryk fast.

4. Placera kanylens gramma i barnets näsa och låt den mjuka öglans remsa komma i kontakt med den låga profilkroken på Sticky Whiskers.



Sticky Whiskers hjälper till att hålla kanylen på plats rakt under barnets näsa. Vill man byta placering, är det bara att lösgöra kroken och öglan och flytta om som önskat.

Sticky Whiskers bör bytas ut om den förorenas eller efter 48-72 timmar. Hydrocolloid basen är ett varsamt men säkert fästmedel, som rekommenderats av NANN hudvårdsföreskrifter. Det kommer inte att skapa irritation under det att

-  Endast för engångsbruk
-  Inte steril
-  Sterilisera inte igen
-  Utsätt inte för temperaturer över 65C
-  Förpackningens innehåll: Denna förpackning innehåller 25 enskilt Sticky Whiskers fästsystem för näskanyl

Artiklarna i förpackningen är rena och färdiga för normal användning. De är inte sterila.


Ursprungsland: USA



Explanation of symbols

	English	Manufacturer
	Français	Fabricant
	Deutsch	Hersteller
	Español	Fabricante
	Svenska	Fabrikör

	English	Authorized Representative
	Français	Représentant Autorisé
	Deutsch	Autorisierter Repräsentant
	Español	Representante Autorizado
	Svenska	Behörigt Representativt

	English	Consult Instructions for use
	Français	Consultez les instructions pour l'usage
	Deutsch	Beraten Sie Anwendungsvorschriften
	Español	Consulte las instrucciones para el uso
	Svenska	Rådfråga Instruktionerna för Använda